

Istruzioni di montaggio e di corretto uso

Unicolor SpA



UNICOLOR S.p.A. a socio unico - Via Fiumicino, 3 - 33082 Azzano Decimo (PN)
tel. +39 0434634111 - fax +39 0434634243 - info@unicolor.net
P. IVA IT01293940936 - Reg. Imp. PN e codice fiscale 02355790284
REA 54367 CCIAA PN - Cap. sociale € 1.800.000 i.v.

Modello 100001

Riparo facciale

Azzano Decimo (PN), 13.05.2020

Sommario

Dati tecnici del prodotto.....	3
Descrizione sintetica del prodotto.....	4
Elementi che compongono il kit	4
Elementi che compongono il riparo facciale	5
Montaggio del riparo facciale.....	6
Istruzioni per l'uso corretto	7

Dati tecnici del prodotto

Fabbricante: Unicolor S.p.A. a socio unico

Indirizzo: Via Fiumicino 3 – 33082 Azzano Decimo PN

Articolo: Riparo facciale

Denominazione modello: 100001

Norma di riferimento: UNI EN 166:2004 – Protezione personale degli occhi (EN 166:2001)

Le parti del dispositivo che sono in contatto con il portatore sono costruite con materiale che notoriamente non provoca notoriamente irritazioni della pelle. In particolare la fascia giro testa, che va a contatto con la pelle, è composta da una struttura plastica Multilayer con i seguenti componenti:

Layer PVC fronte e retro: PVC monomero

Inter-Layer Bo-PET: Poliestere bi-orientato

Dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato per la fascia giro testa: “EN71 – Il multilayer è in linea con gli standard europei sulla sicurezza dei giocattoli EN71 Parte 3 (migrazione di alcuni elementi) e con la American Society Testing and Materials ASTM F963-07”.

Descrizione sintetica del prodotto

Il riparo facciale Unicolor SpA modello 100001 è una visiera che viene posta sul viso, allacciata con idonea fascia giro testa, utile a proteggere l'operatore che lo indossa da goccioline e spruzzi di liquidi prodotti nell'ambiente, in particolare da colleghi presenti (parlando, con colpi di tosse, starnutendo, nella normale respirazione, ecc.).

Il prodotto è pensato principalmente per proteggere occhi, naso e bocca dell'operatore da goccioline e spruzzi che possono essere emessi da altre persone presenti nello stesso ambiente in vicinanza dell'operatore.

E' possibile, per la tipologia di prodotto, abbinare il riparo facciale Unicolor Spa modello 100001 ad una mascherina (sia chirurgica sia di protezione).

La funzione del dispositivo è quella di fornire protezione contro goccioline di liquidi in conformità al riferimento 7.2.4 UNI EN 166 (Certottica, rapporto di prova 201960).

Elementi che compongono il kit

Il riparo facciale Unicolor SpA modello 100001 viene consegnato all'interno di una busta contenente i seguenti elementi:

- A. n. 1 elemento visiera
- B. n. 1 elemento fascetta giro testa

- C. n. 1 Istruzioni di montaggio e di uso (il presente documento)

Elementi che compongono il riparo facciale

Il prodotto è costituito da due elementi: una visiera (elemento A) ed una fascia giro testa (elemento B).

I due elementi non hanno un verso principale e possono essere quindi montati insieme in entrambi i versi. Durante il montaggio, fare eventualmente in modo che le scritte presenti sulla fascia giro testa siano verso la visiera.

Elemento A. Visiera:



Sono individuati dalla X i due connettori presenti sulla visiera; dalla lettera T due tagli presenti sulla visiera.

Elemento B. Fascia giro testa:



Sono individuati:

- da X i punti (fori) in cui inserire i connettori (X) della visiera
- da Z gli elementi (linguetta e fori) per poter chiudere attorno alla testa la fascia giro testa


Montaggio del riparo facciale

Seguire le seguenti istruzioni, per montare correttamente il riparo facciale:

1. Far passare la fascia giro testa all'interno dei tagli T: la fascia rimarrà sul lato interno, a contatto quindi con la fronte dell'operatore.
2. Inserire, con una piccola pressione, uno dei due connettori X presenti sulla visiera (elemento A) all'interno del corrispondente foro X presente sulla fascia giro testa (elemento B). Il doppio taglio permette di incastrare il connettore.
3. Arrotondare la visiera, avvicinando il connettore X libero all'altro, fino a raggiungere il foro X libero sulla fascia giro testa. Quindi inserirlo all'interno, con una piccola pressione.
4. Avvicinare gli estremi della fascia giro testa (Elemento B), lasciando libera ed all'esterno la visiera.
5. Inserire la linguetta Z, dalla parte esterna, all'interno di uno dei fori/tagli Z in modo da creare un cerchio della larghezza della propria testa. La fascia giro testa andrà tenuta attorno alla fronte.

Al seguente link è possibile visionare le modalità di montaggio del dispositivo

<https://print66.it/emergenza-coronavirus-visiera>

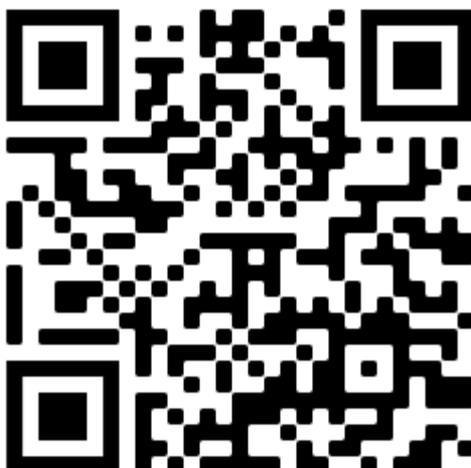

Istruzioni per l'uso corretto

1. Verificare che il DPI sia adeguato all'uso previsto, integro e privo di difetti che possano compromettere la resistenza a goccioline e spruzzi e/o la corretta visione. Il riparo facciale non ha caratteristiche di resistenza meccanica ad impatti (di alcun tipo).
2. Indossare il riparo facciale, montato, inserendolo sulla testa in modo che la fascia giro testa si appoggi alla fronte. La visiera dovrà a questo punto essere davanti al viso e coprire tutto il viso da spruzzi e goccioline.
3. Conservare il prodotto in un luogo asciutto ed al riparo dai raggi del sole. Il prodotto deve essere trasportato e conservato ad una temperatura compresa fra 5°C e 40°C, umidità relativa <30% preservandolo da urti e sfregamenti con altri materiali.
4. La visiera dovrà essere pulita regolarmente, con detergenti neutri. Eventualmente utilizzare una soluzione liquida per la disinfezione.
5. Il prodotto può essere smontato e rimontato. E' consigliabile però ridurre tali attività per evitare di danneggiare i fori o gli stessi connettori. Si consiglia perciò l'uso ad un solo utilizzatore.
6. E' possibile abbinare all'uso del riparo facciale Unicolor S.p.A. una mascherina chirurgica o una maschera FFP2/3.
7. Usato in circostanza normali, il riparo facciale fornisce una protezione adeguata per un periodo che può essere anche superiore a 6 mesi.

